

BIO BOTTLE 商品取扱説明書

(国連規格カテゴリーA/B対応)

【商品構成】

- (1) プラスチック製95kPa耐圧ボトル及びキャップ
- (2) 外装用カートンボックス
- (3) 吸収材
- (4) 緩衝材バブルラップ
- (5) UNシール

【包装手順】

- (1) 試験管、バイアル、チューブなどの1次容器を、吸収材と一緒にバブルラップへ封入し、輪ゴムで固定する。
- (2) (1) をボトルへ入れ、固くキャップを閉める。
- (3) (2) を外装用カートンボックスへ入れ、箱の蓋を閉める。
- (4) 外装箱に必要事項を記載し、内容物が感染性物質カテゴリーBの場合は、UN3373シールに張り替える。

*内容物の分類については、国際輸送と国内輸送では若干違いがあります。国内輸送の場合、第1～4種（除外除く）は、カテゴリーA（UN2814、UN 2900）対応容器の使用が基本となっています。

【注意事項】

- (1) 納入時、外装箱に多少の潰れが発生することがありますが、使用上の問題はありませんのでそのままご使用下さい。
- (2) 当容器は1回使用容器です。2回以上のご使用はお止めください。
高温滅菌や紫外線滅菌などは、素材にダメージを与え、UN基準を満たさなくなる可能性があります。病原体・検体輸送の支障となる場合があります。
- (3) 当製品はキットとして認可されています。指定以外の組み合わせ・ボトル単体でのご使用は、UN基準を満たさなくなる可能性がありますのでおやめください。
- (4) ボトル内に、ドライアイスや揮発性の高いものを入れてのご使用はお止め下さい。容器が膨張し、破裂・破損の原因となります。
- (5) 病原体や検体などの分類に関しては、専門家の指示に従ってください。
- (6) 実際の輸送にあたっては、輸送業者の指示に従ってください。

【お問い合わせ】


トレンドサイン株式会社

東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル6F

info@trendsign.co.jp

電話：03-5937-5721 / FAX：03-5937-5722

How to pack for CLASS 6.2 Category A (UN2814/UN2900) and B(UN3373)

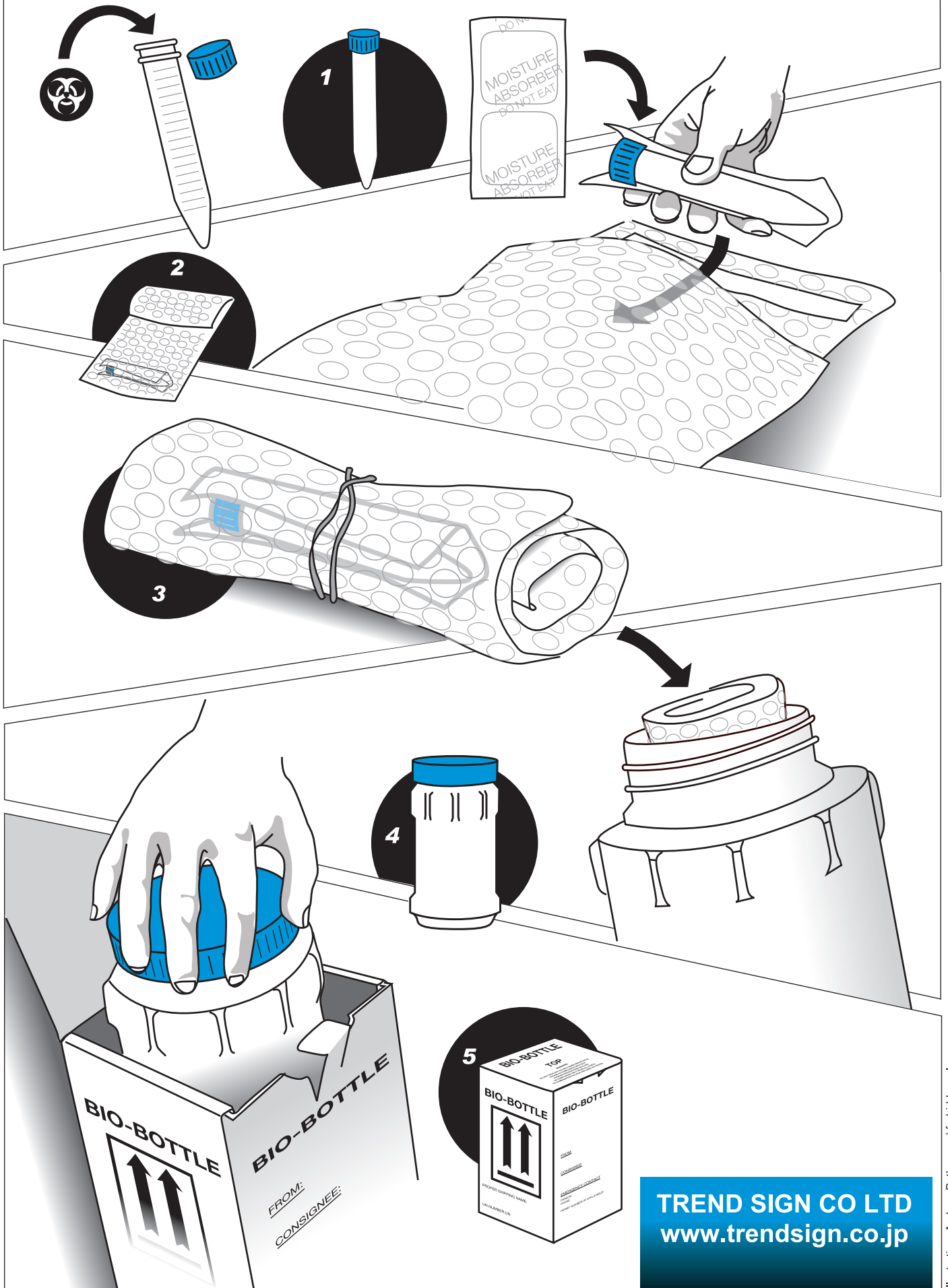

TREND SIGN CO LTD
www.trendsign.co.jp